



IUB™
Ballerine®

Dispozitiv intrauterin sferic fără hormoni



PERFECT PENTRU TINE

www.iub-ballerine.ro



TERMEN ÎNDELUNGĂT
PENTRU 5 ANI

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



Medicul ți-a prescris **IUB™ Ballerine®**.

În această broșură vei găsi răspunsurile întrebărilor frecvente despre contracepția cu **IUB™ Ballerine®** fără hormoni.

Această broșură nu înlocuiește consultația individuală efectuată la medic. Umătoarele informații, de asemenea, nu înlocuiesc prospectul pentru pacient, care conține detalii importante ce trebuiesc a fi luate în considerare când folosești acest dispozitiv medical, în ce circumstanțe nu trebuie folosit și ce efecte adverse pot apărea.

*anterior numit IUB SCu300 Intrauterine Device

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil
PERFECT PENTRU TINE



IUB™ BALLERINE®

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.




La fel ca dispozitivele intrauterine pe bază de cupru,
IUB™ Ballerine®:

- este un contraceptiv fără hormoni
- previne sarcina acționând local - în uter
- este eficient până la 5 ani
- nu afectează libidoul sau metabolismul osos
- nu are influență asupra ovulației
- nu cauzează îngrășare
- oferă eficiență mare
- este o alternativă pentru sterilizarea permanentă – operație ce poate fi evitată

IUB™ Ballerine® este potrivit pentru femeile tinere care nu au fost însărcinate. Fertilitatea este reinstaurată imediat după înlăturare.

Medicul curant vă va sfătui cu privire la metoda de contracepție potrivită pentru tine.

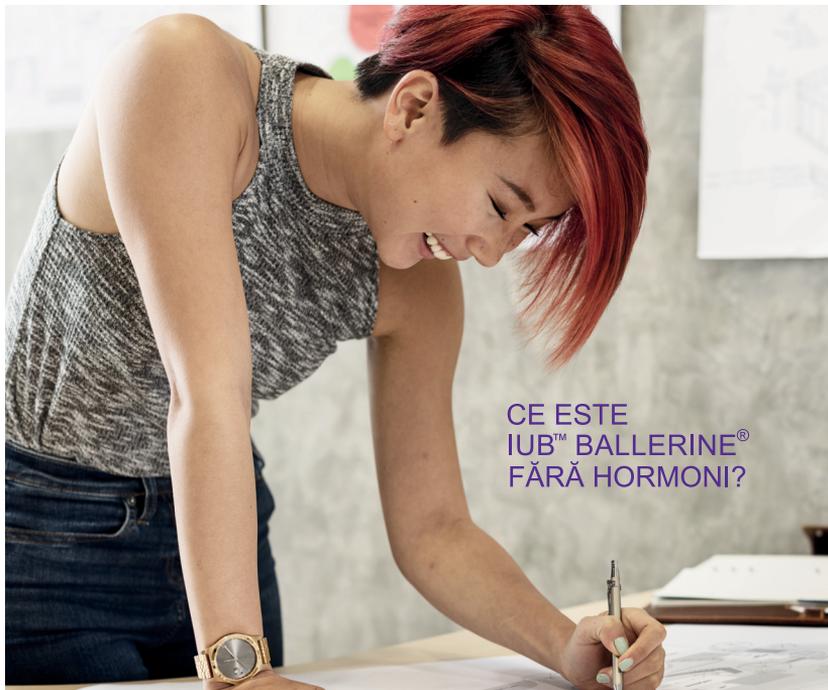

CE ESTE
IUB™ BALLERINE®
FĂRĂ HORMONI?

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil
PERFECT PENTRU TINE



Contracepție high-tech fără hormoni pentru 5 ani

IUB™ Ballerine® este o metodă de control a sarcinii ce nu necesită hormoni și este eficientă până la 5 ani.


IUB™ Ballerine® acționează local folosind același principiu ca și celelalte dispozitive intrauterine prevenind sarcina. Efectul contraceptiv vine în principal de la cupru.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CONTRACEPȚIA
PERFECTĂ PENTRU TINE

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.

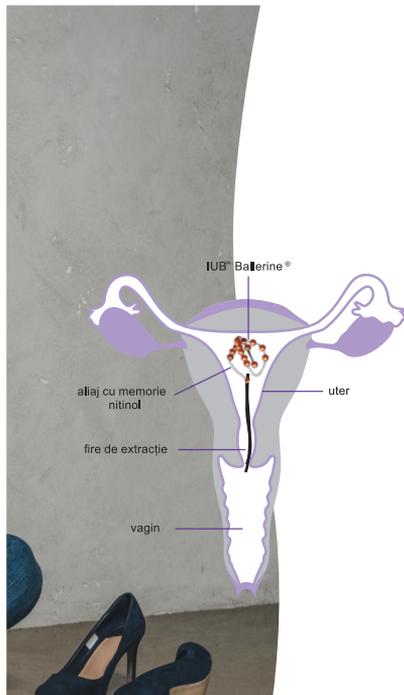

DIU **IUB™ Ballerine®** prietenos și flexibil cu uterul format dintr-un alaj special cu memorie - nitinol, acoperit cu polimer și mai multe perle din cupru. Datorită formei sale speciale și a materialului, **IUB™ Ballerine®** se adaptează ideal formei uterului și minimizează riscul rănirii și iritației.

De un capăt al dispozitivului sunt atașate două fire ce permit medicului să extragă **IUB™ Ballerine®**.

Aliajul nitinol este folosit cu succes de peste 20 de ani în multe implanturi medicale. Utilizarea unui material sferic purtător de nitinol în dispozitivul de contracepție intrauterină este unică.

IUB™ Ballerine® este eficient
până la 5 ani.



DIU 3-DIMENSIONAL
IUB™ BALLERINE®

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil
PERFECT PENTRU TINE

**IUB™ Ballerine®
MINI**
Dispozitiv intrauterin
12 mm

**IUB™ Ballerine®
MIDI**
Dispozitiv intrauterin
15 mm



IUB™ Ballerine® este o treime până la jumătate din dimensiunea dispozitivelor intrauterine tradiționale și poate fi ușor introdus.

Odată ce **IUB™ Ballerine®** este introdus în uter, acesta ia o formă sferică 3D.

IUB™ Ballerine® este disponibil în 2 dimensiuni diferite de - 12 mm și 15 mm diametru, dintre care medicul curant va putea să aleagă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CUM FUNCȚIONEAZĂ
IUB™ BALLERINE® ?

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



Imediat ce **IUB™ Ballerine®** este introdus în uter, acesta începe să elibereze continuu cantități mici de cupru pentru un control al sarcinii de până la 5 ani.

Metoda de acțiune este similară dispozitivelor intrauterine standard pe bază de cupru.

DIUe pe bază de cupru își ating principalul efect contraceptiv prin interferența cu motilitatea spermei și a fertilizării ovocitului și eventual prevenirea implantării.

Cantitatea de cupru eliberată de **IUB™ Ballerine®** este minimă.



CONTRACEPȚIE SIGURĂ
PERFECT PENTRU TINE



CÂT DE SIGUR ESTE IUB™ BALLERINE®?

Eficiența **IUB™ Ballerine®** este de peste **99%**
în prevenirea sarcinii.

IUB™ BALLERINE® ÎN TIMPUL ACTULUI SEXUAL?

În timpul actului sexual, tu și partenerul tău nu ar trebui să simțiți **IUB™ Ballerine®**, dacă este introdus corect. Dacă tu sau partenerul tău puteți simți firele, medicul le poate scurta.

*raportare de vigilență continuă pentru IUB™ Ballerine®, OCON Medical Ltd.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



CÂND ȘI UNDE
ESTE ÎNTRUDUS
IUB™ BALLERINE® ?

IUB Ballerine® fără hormoni este introdus în
uter de către medicul dumneavoastră curant.




IUB™ Ballerine® fără hormoni este introdus în uter în timpul vizitei la cabinet după o consultație individuală de către medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră întâi vă examinează pentru a găsi poziția uterului. După măsurarea uterului, **IUB™ Ballerine®** este introdus cu grijă printr-un tub subțire.

Tubul este înlăturat în timp ce **IUB™ Ballerine®** rămâne în uter unde va găsi poziția ideală devenind activ imediat. Poziția corectă a **IUB™ Ballerine®** poate fi verificată printr-o examinare ecografică. Două fire se extind în vagin. Firele sunt tăiate pentru a minimiza disconfortul.

Cel mai bun moment pentru montarea dispozitivului îl reprezintă ultimele zile ale menstruației când colul uterin este mai deschis și posibilitatea de a fi însărcinată este scăzută. Între patru și doisprezece săptămâni de la montare ar trebui efectuată o examinare. După aceasta, este recomandată o verificare anuală de către medicul dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.

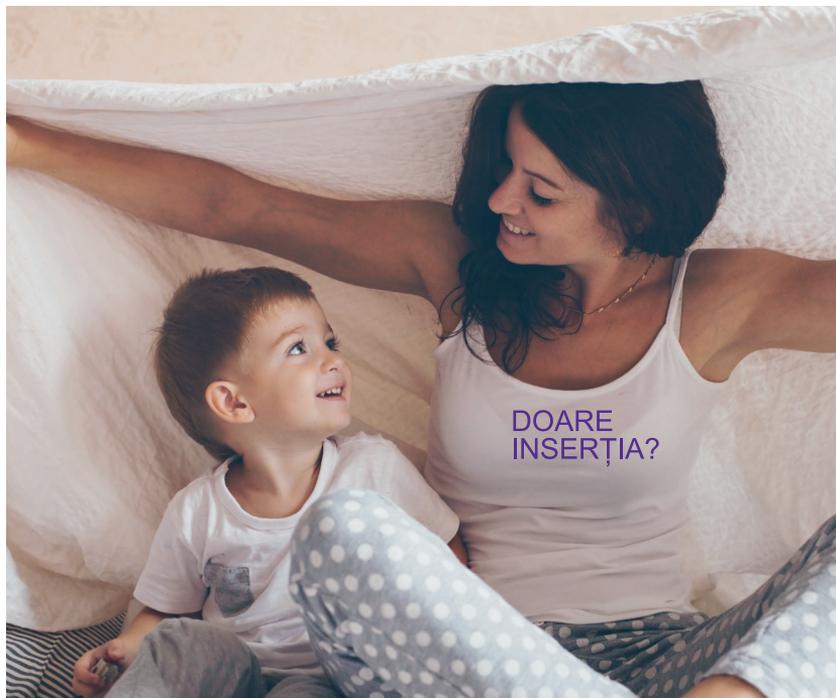

Vizionați procedura de inserție pe
www.iub-ballerine.ro



Montarea **IUB™ Ballerine®** poate fi dureroasă în mod special când colul uterin este foarte strâmt. Puteți solicita medicului să folosească un anesteziec local sau un tratament preventiv pentru reducerea durerii.

Imediat după inserție, crampele sau sângerările menstruale pot apărea. Unele femei au stări de greață sau amețeli la câteva minute de la inserție. Nu există motive de îngrijorare, uterul are nevoie de timp pentru a se adapta noii situații. Orice durere de obicei scade rapid. Dacă durere continuă, vă rugăm să consultați medicul.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CE EFECTE ADVERSE POT SĂ APARĂ?

Dacă aveți întrebări despre efectele adverse
consultați medicul.



După montarea **IUB™Ballerine®** pot apărea menstruații mai abundente, mai lungi, iar diminuarea efectelor adverse poate fi observată după 2-3 luni. Odată ce uterul se obișnuiește cu **IUB™Ballerine®** aceste efecte adverse ar trebui să apară mai rar.

Rar, **IUB™Ballerine®** trece prin peretele uterului, în special în momentul montării. Aceasta se numește perforare. Dacă **IUB™Ballerine®** perforază uterul, acesta trebuie îndepărtat. Este posibil să fie nevoie de intervenție chirurgicală. Dacă **IUB™Ballerine®** perforază uterul, nu ești protejată împotriva sarcinii.

IUB™Ballerine® poate să cadă parțial sau complet din uter. Acest lucru se numește expulzare. Femeile care nu au fost gravide au mai multe șanse să expulzeze **IUB™Ballerine®** decât femeile care au fost însărcinate.

Vă rugăm să consultați prospectul cu informații pentru pacient pentru mai multe informații despre efectele adverse ce pot să apară.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CINE NU AR
TREBUI SĂ FOLOSEASCĂ
IUB™ BALLERINE®?

Dacă aveți întrebări
consultați medicul.



Nu ar trebui să folosiți IUB™ Ballerine® dacă:

- este posibil să fiți însărcinată.
- aveți o formă anormală a uterului.
- aveți o infecție pelviană numită boală inflamatorie pelviană sau aveți un risc ridicat de obținere a unei boli inflamatorii pelviane (de exemplu, dacă dvs. sau partenerul întrețineți relații sexuale cu mai mulți parteneri).
- ați avut o infecție în uter după sarcină sau avort în ultimele 3 luni.
- aveți cancer uterin sau de col uterin.
- aveți sângerări inexplicabile din vagin.
- aveți o infecție de col uterin.
- aveți boala Wilson (o anomalie a organismului în ceea ce privește cuprul).
- sunteți alergică la unul din materialele IUB™ Ballerine® (cupru, nichel, titan, PET și polipropilen).
- aveți deja un dispozitiv intrauterin în uter.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



INFORMAȚII IMPORTANTE

IUB™ Ballerine® trebuie îndepărtat după 5 ani. Poate fi înlocuit imediat cu un nou dispozitiv **IUB™ Ballerine®**.



Consultați medicul curant dacă:

- credeți că sunteți însărcinată
- aveți dureri pelvine sau partenerul dvs. simte durere în timpul actului sexual
- aveți secreții vaginale neobișnuite sau leziuni genitale
- aveți febră inexplicabilă
- este posibil să fi fost expusă bolilor cu transmitere sexuală
- puteți simți o componentă a **IUB™ Ballerine®** în afară de fire
- dacă dvs. sau partenerul deveniți HIV pozitiv
- aveți sângerări vaginale severe sau prelungite
- ciclul menstrual lipsește

IUB™ Ballerine® nu protejează împotriva infecțiilor HIV și a altor boli cu transmitere sexuală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



www.iub-ballerine.ro

IUB® este o marcă a OCON Medical Ltd.
Ballerine® este o marcă înregistrată a OCON Medical Ltd.



Numele și adresa pacientului:

Vă rugăm să bifați căsuțele și să completați:

Am citit informațiile ce mi-au fost înmădate,

În consultația cu _____ am discutat în principal despre: alegerea metodei, avantajele și dezavantajele comparate cu alte metode, posibile complicații, factori ce pot crește riscurile, comportamentul, verificări, măsuri adiționale până la prima verificare, de asemenea:

La întrebări mi s-a răspuns complet și înțelegător.
Nu am nevoie de timp suplimentar pentru înțelegere.

Conținut:

Vă rugăm să bifați căsuțele și să completați:

- După o analiză atentă, doresc să am inserat **IUB™ Ballerine®**.
- Sunt de acord cu înlocuirea **IUB™ Ballerine®** și nu am nevoie de mai multe informații. Am fost informat despre utilizarea **IUB™ Ballerine®** fără hormoni, eficiență și efecte adverse.

Locul, Data

Semnătura pacientului

Semnătura medicului

Unic Importator și Distribuitor în România
Dux MD Pharma Solutions SRL
www.duxmd.ro
Tel. (+40) 769 954 577



www.iub-ballerine.ro

DuxM
pharma solutions