



IUB™
Ballerine®

Dispozitiv intrauterin sferic fără hormoni



ADAPTAT PENTRU TINE

www.iub-ballerine.ro

CONTRACEPȚIE
PE TERMEN LUNG
PENTRU 5 ANI

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



Medicul ți-a prescris **IUB™ Ballerine®**.

În această broșură vei găsi răspunsurile la întrebările
frecvente despre contracepția non-homonală **IUB™ Ballerine®**

Această broșură nu înlocuiește consultația individuală efectuată
la medic. Următoarele informații, de asemenea, nu înlocuiesc
prospectul pentru pacient, care conține detalii importante ce trebuie
a fi luate în considerare când utilizezi acest dispozitiv medical, în
ce circumstanțe nu trebuie folosit și ce efecte adverse pot apărea.

*anterior numit IUB SCU300 Intrauterine Device
IUB™ Ballerine® nu este aprobat spre vânzare în SUA.

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil
ADAPTAT PENTRU TINE

IUB™ BALLERINE®
PER ANSAMBLU



Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



La fel ca și dispozitivele intrauterine pe bază de cupru,
IUB™ Ballerine®:

- este un contraceptiv fără hormoni
- previne sarcina acționând local - în uter
- este eficient până la 5 ani
- nu afectează libidoul sau metabolismul osos
- nu are influență asupra ovulației
- nu cauzează îngrășare
- oferă eficiență ridicată
- este o alternativă pentru sterilizarea permanentă – operație ce poate fi evitată

IUB™ Ballerine® este potrivit pentru femeile tinere care nu au fost însărcinate. Fertilitatea este restabilă imediat după înlăturare.

Medicul curant te va sfătui cu privire la metoda de contracepție potrivită pentru tine.



CE ESTE
IUB™ BALLERINE®
FĂRĂ HORMONI?

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil
ADAPTAT PENTRU TINE



Contracepție high-tech fără hormoni pentru 5 ani


IUB™ Ballerine® este o metodă contraceptivă ce nu necesită hormoni și este eficientă până la 5 ani.

IUB™ Ballerine® acționează local folosind același principiu ca și celelalte dispozitive intrauterine prevenind sarcina. Efectul contraceptiv vine în principal de la cupru.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.

CONTRACEPȚIA
ADAPTATĂ PENTRU TINE

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.

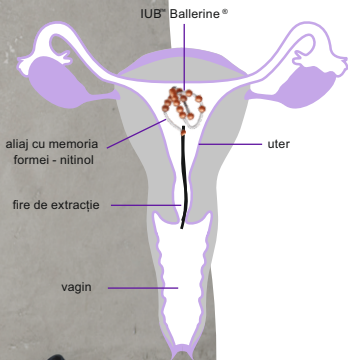

DIU **IUB™ Ballerine®** prietenos și flexibil cu uterul, format dintr-un aliaj special cu memorie - nitinol, acoperit cu polimer și mai multe perle din cupru. Datorită formei sale speciale și a materialului, **IUB™ Ballerine®** se adaptează ideal formei uterului și minimizează riscul rănirii și iritației.

De un capăt al dispozitivului sunt atașate două fire ce permit medicului să extragă **IUB™ Ballerine®**.

Aliajul nitinol este folosit cu succes de peste 20 de ani în multe implanturi medicale. Utilizarea unui material sferic purtător de nitinol în dispozitivul intrauterin de contracepție este unică.

IUB™ Ballerine® este eficient
până la 5 ani.



DIU 3-DIMENSIONAL IUB™ BALLERINE®

fără hormoni | perioadă îndelungată | eficient | sigur | reversibil

ADAPTAT PENTRU TINE

IUB™ Ballerine®
MIDI
Dispozitiv intrauterin
15 mm



IUB™ Ballerine® este o treime până la jumătate din dimensiunea dispozitivelor intrauterine tradiționale și poate fi inserat cu ușurință.

Odată ce **IUB™ Ballerine®** este introdus în uter, acesta ia o formă sferică 3D.

IUB™ Ballerine® are un diametru de 15 mm.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.

CUM FUNCȚIONEAZĂ
IUB™ BALLERINE®?

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



Imediat ce **IUB™ Ballerine®** este introdus în uter, acesta începe să elibereze cantități mici de cupru pentru un efect contraceptiv continuu timp de până la 5 ani.

Metoda de acțiune este similară cu cea a dispozitivelor intrauterine standard pe bază de cupru.

DIUe pe bază de cupru își ating principalul efect contraceptiv prin interferența cu motilitatea spermatozoizilor și a fertilizării ovocitului și eventual prevenirea implantării.

Cantitatea de cupru eliberată de **IUB™ Ballerine®** este minimă.



CONTRACEPȚIE SIGURĂ
ADAPTATĂ PENTRU TINE



CÂT DE SIGUR ESTE IUB™ BALLERINE®?

Eficiența IUB™ Ballerine® este de peste 99%
în prevenirea sarcinii.

IUB™ BALLERINE® ÎN TIMPUL ACTULUI SEXUAL?

În timpul actului sexual, tu și partenerul tău nu ar trebui să simțiți IUB™ Ballerine®, dacă este introdus corect. Dacă tu sau partenerul tău puteți simți firele, medicul le poate scurta.

*raportare de vigilență continuă pentru IUB™ Ballerine®, OCON Medical Ltd.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul
pentru pacient.



CÂND ȘI UNDE
ESTE ÎNTRDUS
IUB™ BALLERINE®?

IUB™ Ballerine® fără hormoni este introdus în
uter de către medicul tău curant.



IUB™ Ballerine® fără hormoni este introdus în uter în timpul vizitei la cabinet după o consultație individuală efectuată de către medic. Pentru început medicul te examinează pentru a găsi poziția uterului. După măsurarea uterului, **IUB™ Ballerine®** este introdus cu grijă printr-un tub subțire.

Tubul este înlăturat în timp ce **IUB™ Ballerine®** rămâne în uter unde va găsi poziția ideală devenind activ imediat. Poziția corectă a **IUB™ Ballerine®** poate fi verificată printr-o examinare ecografică. Două fire se extind în vagin. Firele sunt tăiate pentru a minimiza disconfortul.

Cel mai bun moment pentru montarea dispozitivului este în timpul menstruației când colul uterin este mai deschis și posibilitatea de a fi însărcinată este scăzută. La 2 luni de la montare ar trebui efectuată o examinare de control. După aceea, este recomandat un control anual la medic.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



DOARE
INSERTIA?

Vizionați procedura de inserție pe
www.iub-ballerine.ro



Montarea IUB™ **Ballerine**® poate fi dureroasă în mod special când colul uterin este foarte strâmt. Poți solicita medicului un medicament pentru durere cu 1 oră înainte de inserție.

Imediat după inserție, crampele sau sângerările menstruale pot apărea. Unele femei au stări de greață sau amețeli la câteva minute de la inserție. Nu există motive de îngrijorare, uterul are nevoie de timp pentru a se adapta noii situații. Orice durere de obicei scade rapid. Dacă durere continuă, te rugăm să consulți medicul.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CE EFECTE ADVERSE POT SĂ APARĂ?

Dacă aveți întrebări despre efectele adverse
consultați medicul.



După montarea **IUB™ Ballerine®** pot apărea menstruații mai abundente, mai lungi, iar diminuarea efectelor adverse poate fi observată după 2-3 luni. Odată ce uterul se obișnuiește cu **IUB™ Ballerine®** aceste efecte adverse ar trebui să apară mai rar.

Rar, **IUB™ Ballerine®** trece prin peretele uterului, în special în momentul montării. Aceasta se numește perforare. Dacă **IUB™ Ballerine®** perforează uterul, acesta trebuie îndepărtat. Este posibil să fie nevoie de intervenție chirurgicală. Dacă **IUB™ Ballerine®** perforează uterul, nu ești protejată împotriva sarcinii.

IUB™ Ballerine® poate să cadă parțial sau complet din uter. Acest lucru se numește expulzare. Femeile care nu au fost gravide au mai multe șanse să expulzeze **IUB™ Ballerine®** decât femeile care au fost însărcinate.

Vă rugăm să consultați prospectul cu informații pentru pacient pentru mai multe informații despre efectele adverse ce pot să apară.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



CINE NU AR
TREBUI SĂ FOLOSEASCĂ
IUB™ BALLERINE®?

Dacă aveți întrebări
consultați medicul.



Nu ar trebui să folosești IUB™ Ballerine® dacă:

- este posibil să fii însărcinată.
- ai o formă anormală a uterului.
- ai o infecție pelvină numită boală inflamatorie pelvină sau ai un risc ridicat de obținere a unei boli inflamatorii pelvine (de exemplu, dacă tu sau partenerul întrețineți relații sexuale cu mai mulți parteneri).
- ai avut o infecție în uter după sarcină sau avort în ultimele 3 luni.
- ai cancer uterin sau de col uterin.
- ai sângerări inexplicabile din vagin.
- ai o infecție de col uterin.
- ai boala Wilson (o anomalie a organismului în ceea ce privește cuprul).
- ești alergică la unul din materialele IUB™ Ballerine® (cupru, nichel, titan, PET și polipropilen).
- ai deja un dispozitiv intrauterin în uter.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.



INFORMAȚII
IMPORTANTE

IUB™ Ballerine® trebuie îndepărtat după 5 ani. Poate fi înlocuit imediat cu un nou dispozitiv IUB™ Ballerine®.

Consultă medicul curant dacă:

- crezi că ești însărcinată
- ai dureri pelvine sau dacă tu ori partenerul simțiți dureri în timpul actului sexual
- ai secreții vaginale neobișnuite sau leziuni genitale
- ai febră inexplicabilă
- este posibil să fi fost expusă bolilor cu transmitere sexuală
- poți simți o componentă a **IUB™ Ballerine®** în afară de fire
- dacă tu sau partenerul deveniți HIV pozitiv
- ai sângerări vaginale severe sau prelungite
- ciclul menstrual lipsește

IUB™ Ballerine® nu protejează împotriva infecțiilor HIV și a altor boli cu transmitere sexuală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul pentru pacient.

www.iub-ballerine.ro



Rev. 02 - Sept. 2023

IUB™ este o marcă a OCON Medical Ltd.
Ballerine® este o marcă înregistrată a OCON Medical Ltd.



Numele și adresa pacientului:

Vă rugăm să bifați căsuțele și să completați:

☐ Am citit informațiile ce mi-au fost înmânate.

☐ În consultația cu _____
am discutat în principal despre: alegerea metodei,
avantajele și dezavantajele comparate cu alte
metode, posibile complicații, factori ce pot
crește riscurile, comportamentul, verificări,
măsuri adiționale până la prima verificare,
de asemenea:

La întrebări mi s-a răspuns complet și înțelegător.
Nu am nevoie de timp suplimentar pentru înțelegere.

Conținut:

Vă rugăm să bifați căsuțele și să completați:

☐ După o analiză atentă, doresc să am inserat
IUB™ Ballerine®.

☐ Sunt de acord cu înlocuirea **IUB™ Ballerine®**
și nu am nevoie de mai multe informații.
Am fost informat despre utilizarea **IUB™ Ballerine®**
fără hormoni, eficiență și efecte adverse.

Locul, Data

Semnătura pacientului

Semnătura medicului

